

# Bedienungsanleitung





# Erste Schritte

Voice Selector Converse und die Kopfhörer sind bei Lieferung bereits verbunden. Einfach einschalten und die Unterhaltung genießen!

## ① Die Kopfhörer einschalten

Kopfhörer aufsetzen und Einschalttaste drücken -  
Warten Sie, bis Sie das Wort: "Power on" hören

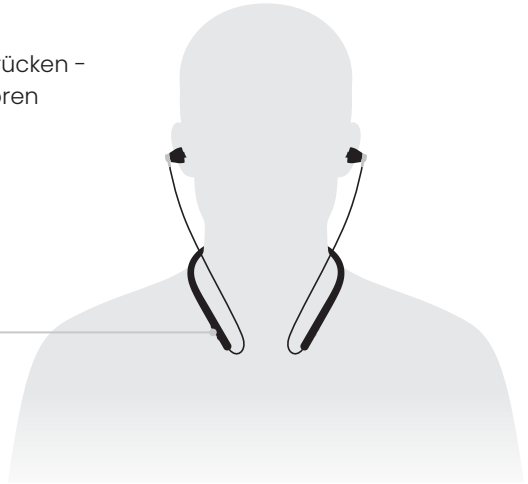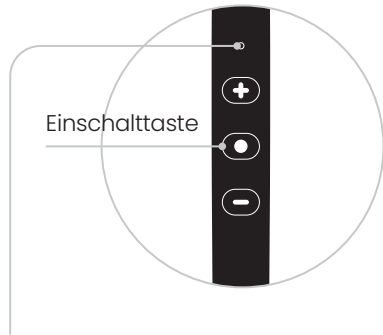


Anzeigen:

• Rotes blinken  
Suche nach Gerät

• Blaues blinken  
Gerät gefunden  
Sie hören Folgendes: "Connected"

## ② Den Voice Selector Converse einschalten

Die Einschalttaste drücken

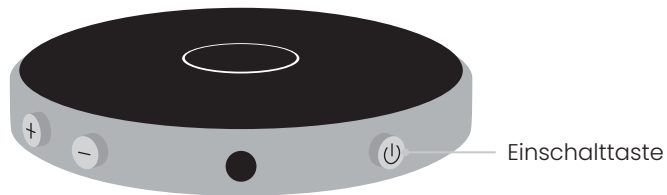

Akkustand



Suche nach verbundenen Kopfhörern



Einsatzbereit


Anzeigen:

# Modi für persönliche Unterhaltungen

Das Gerät wechselt nahtlos je nach Position zwischen Tisch- und Remote-Mikrofon-Modus

## Tischmikrofon


Voice Selector Converse scannt die offenen Sprechrichtungen und wählt automatisch bis zu zwei dominante Sprecher aus

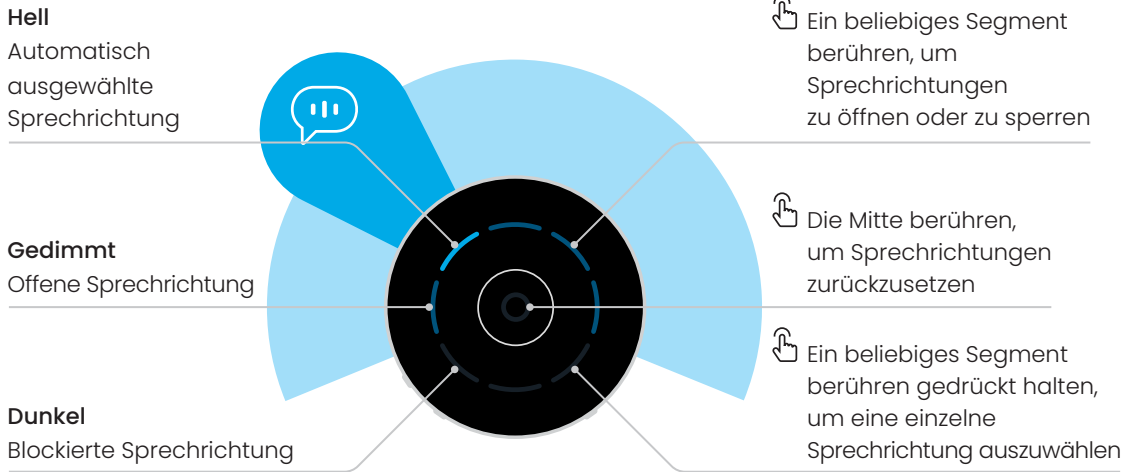

**Geräteausrichtung:** offene Segmente zeigen zur Gruppe, blockierte Segmente zeigen zu Ihnen

## Remote-Mikrofon

Wenn Ihr Gesprächspartner Voice Selector Converse trägt, profitieren Sie von optimaler Klarheit bei Aktivitäten wie Spaziergängen, Autofahrten oder beim Kochen

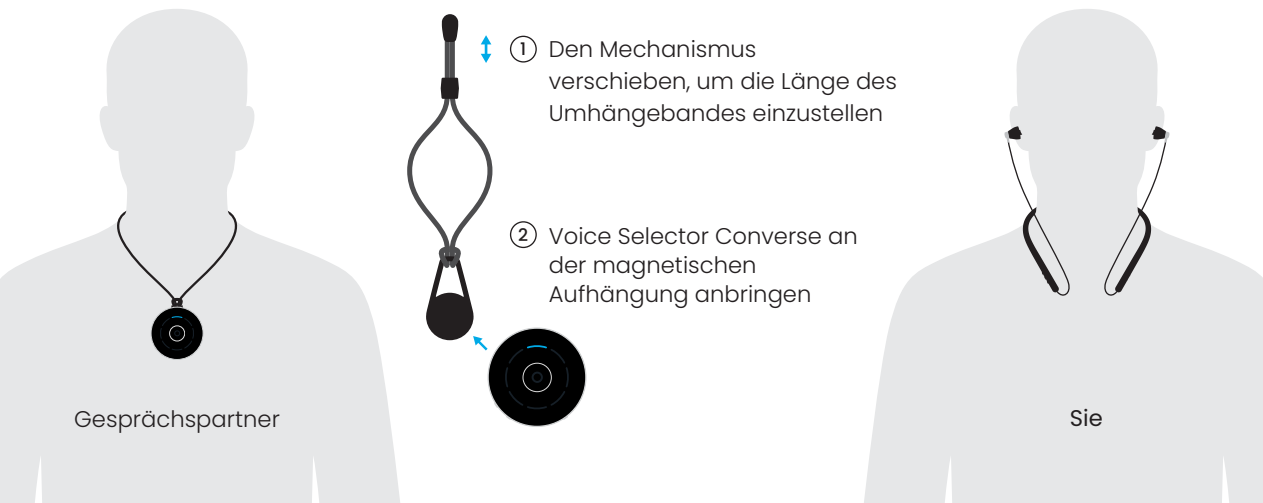


# Lautstärkeregelung

Für ein optimales Ergebnis stellen Sie die Lautstärke so ein, dass die Stimmen natürlich klingen. Eine hohe Lautstärke kann unerwünschte Stimmen und Hintergrundgeräusche verstärken.



# Beide Geräte laden

Das Micro-USB-Kabel verwenden, um den Voice Selector Converse und die Ohrstöpsel aufzuladen

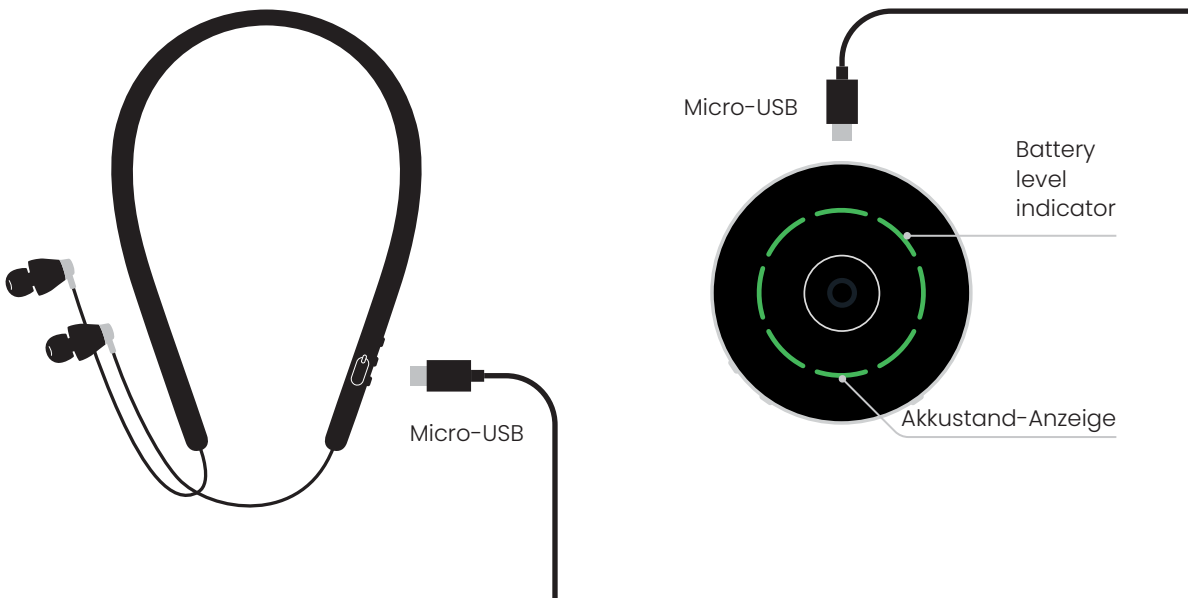


# Anpassung der Ohrstöpsel

Die bequemste Größe für Ihre Ohren auswählen.

Die Anbringung des passenden Aufsatzes reduziert Außengeräusche und verbessert das Sprachverständnis.

Zum Entfernen des Aufsatzes:  
fest ziehen

Zum Anbringen des Aufsatzes:  
drücken, bis er einrastet

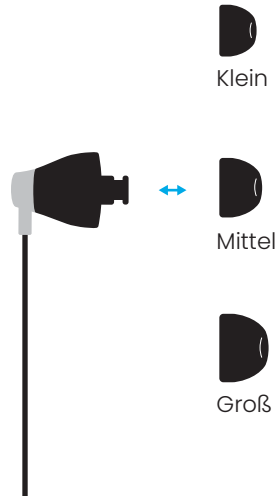


# Die Nuance Hearing App


Die App herunterladen, um zusätzliche Funktionen freizuschalten



Den QR-Code  
einscannen

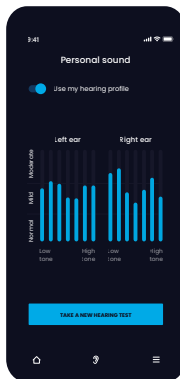

Einen Hörtest machen,  
um ein persönliches  
Hörprofil zu erstellen

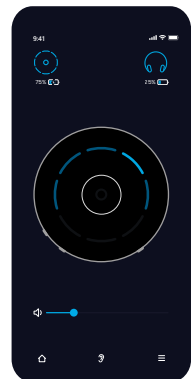


Die App als  
Fernsteuerung für  
das Gerät verwenden

# Kopfhörer über Bluetooth verbinden

Um die Kopfhörer mit einem Bluetooth-fähigen Gerät oder mit Voice Selector Converse zu verbinden, führen Sie folgende Schritte durch:

## ① Schalten Sie die Kopfhörer in den Anbindungsmodus

- Drücken Sie die Einschalttaste, um die Kopfhörer auszuschalten. Sie hören: "Power off"
- Setzen Sie die Kopfhörer auf und halten Sie die Einschalttaste **länger gedrückt**. Sie hören: "Power on... Pairing"

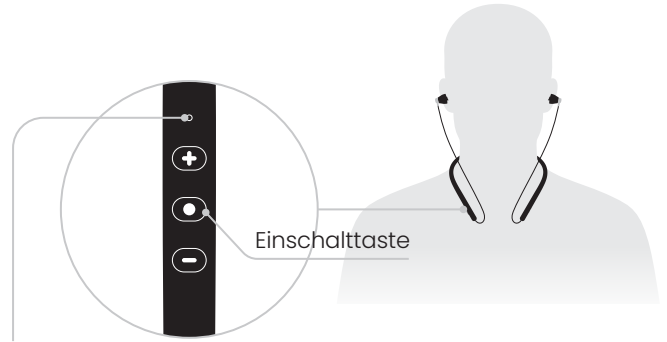

Anzeigen

• • Rotes und blaues Blinken  
Suche nach Gerät  
zum Koppeln

• Blau  
Gerät  
verbunden

## ②<sup>A</sup> Anbindung an Smart TV, Smartphone oder PC


- Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf dem Gerät, das sie gerne koppeln möchten
- Wählen Sie den Namen Ihrer Kopfhörer aus: BEP2400  
Sie hören: "Pairing successful, connected"



## ②<sup>B</sup> Erneute Kopplung mit Voice Selector Converse

Nur wenn die Anbindung unterbrochen wird

- Entfernen Sie die Silikonhülle des Geräts
- Halten Sie die Bluetooth-Taste so **lange gedrückt**, bis der Anbindungsmodus gestartet wird

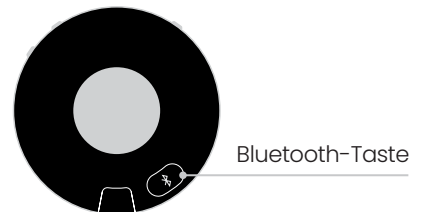

Anzeigen: Keine Kopfhörer verbunden

Anbindungsmodus

Kopplung abgeschlossen

# Sicherheitshinweise

## Gerätenutzung

Der Voice Selector Converse mit kabellosen Ohrhörern ist eine einzigartige unterstützende Hörlösung, die Umgebungsgeräusche reduziert und in die ausgewählte Hör-Richtung fokussiert.

Die Lager- und Betriebstemperatur sollte zwischen 10° und 45°C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 10% und 95% liegen.

## Gerätereinigung

Das Gerät sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

## Hinweise zur Entsorgung elektronischer Geräte

Elektroschrott ist gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen. Nuance Hearing Ltd. empfiehlt, das Gerät über die regionale Entsorgung von elektronischen Geräten zu recyceln. Lokalen Gesetzen ist dabei Folge zu leisten.

## Gemäß den Vorschriften sind wir verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen

- Warnung: Längeres Hören mit hoher Lautstärke wird nicht empfohlen und kann zu irreversiblen Gehörschäden führen.
- Warnung: Die Verwendung von Zubehör, Komponenten oder Ersatzteilen, die nicht von Nuance Hearing geliefert wurden, kann die Nutzung beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Die Batterie im Voice Selector Converse und in den drahtlosen Ohrhörern ist nicht austauschbar und sollte nicht ersetzt werden.
- Wenn Sie andere Medizingeräte nutzen oder implantierte Medizingeräte wie einen Defibrillator oder einen Herzschrittmacher tragen und sich Sorgen über mögliche Interferenzen machen, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller Ihres Medizingeräts nach Störungsrisiken.

## Normen und Vorschriften

Voice Selector Converse und die kabellosen Ohrhörer erfüllen strengste internationale Standards für elektronische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.





## **Wir sind gerne für Sie da**

Für unseren Online-Support bitte den QR-Code scannen

[support@nuancehear.com](mailto:support@nuancehear.com)

[www.nuancehear.com](http://www.nuancehear.com)