

המדריך למשתמש



nuance
hearing


Voice Selector
Converse

איך מתחילים?

המוצר והאוזניות מגיעים מקושרים מראש. ליהנות מהשיחה בהפעלה פשוטה.

① הפעלת האוזניות

הרכיבו את האוזניות ולחצו על כפתור ההפעלה
כעת תשמעו: "Power on"

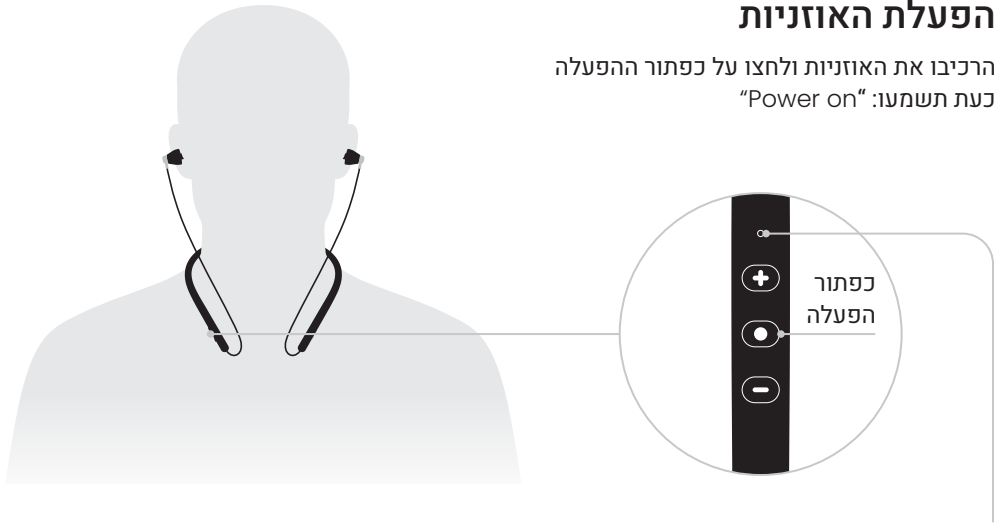


מקרא:

- כחול מהבהב
נמצא מכשיר
כעת תשמעו: "Connected"
- אדום מהבהב
חיפוש מכשיר בסביבה

② הפעלת Voice Selector Converse

לחצו על כפתור ההפעלה

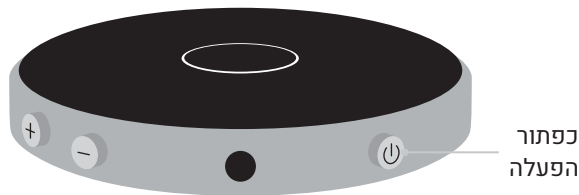

כפתור
הפעלה



מחובר ומוכן לשימוש



חיפוש אוזניות מקושרות בסביבה



רמת הסוללה


מקרא:

מצבי שיחה

המכשיר יודע לעבור בין שני מצבי השיחה, מיקרופון שולחני ומיקרופון מרוחק, בהתאם למיקומו

מיקרופון שולחני

Voice Selector Converse סורק את הכיוונים הפתוחים ובוחר אוטומטית את הדובר המרכזי

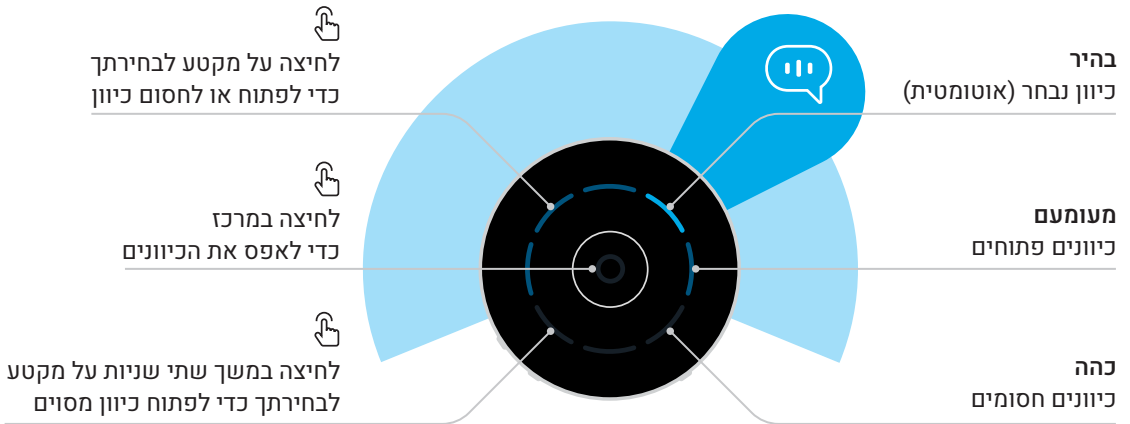

כיווניות המוצר: המקטעים הפתוחים פונים אל הקבוצה, המקטעים החסומים ממוקמים מולכם

מיקרופון מרוחק

האזנה במצבים כמו הליכה, נסיעה או בישול, ניתן לתת לשותפך לשיחה לענווד את Voice Selector Converse




התאמת עוצמת השמע

כדי ליהנות מחוויה מיטבית, יש לכוון את עוצמת השמע כך שהצלילים יישמעו לך טבעיים (עוצמת שמע גבוהה מידי עשויה להגביר רעשי רקע וצלילים לא רצויים)




הטענה

יש להשתמש בכבל ה-Micro-USB בכדי לטעון את Voice Selector Converse ואת האוזניות

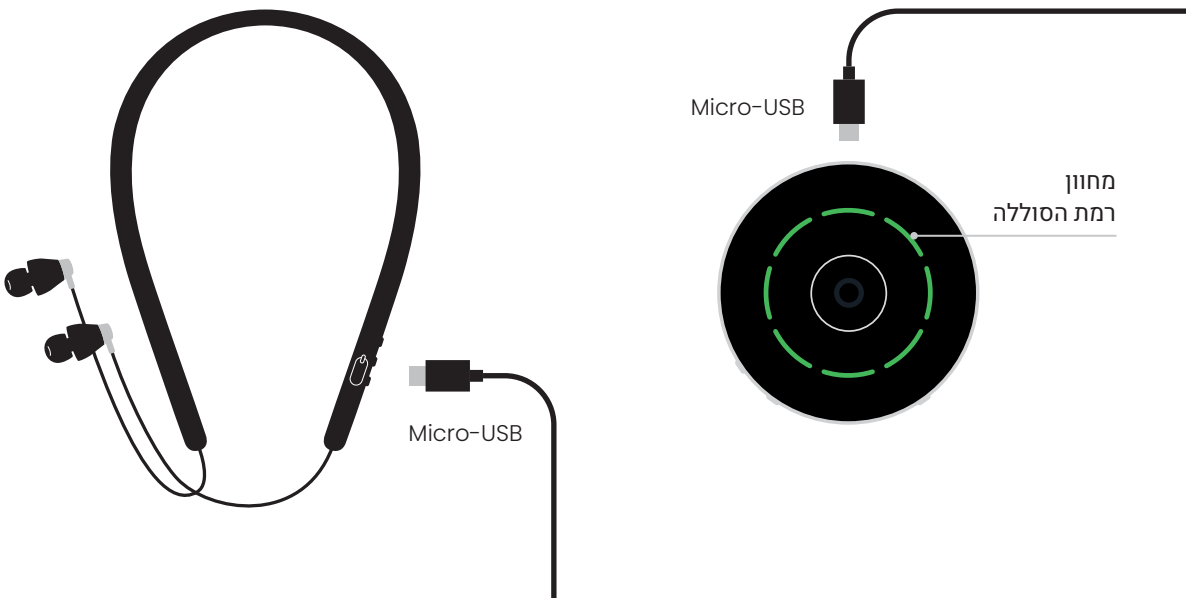

התאמת האוזניות


להתאים בצורה הטובה ביותר את האוזניות לאוזניים שלך.
התאמה טובה תפחית את רעשי הרקע ותשפר את הבנת הדיבור.

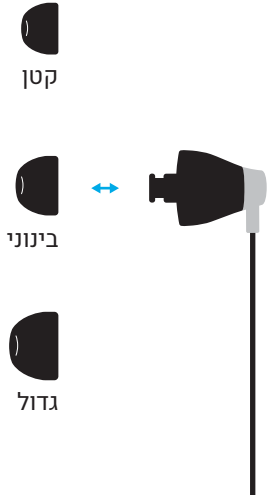


כדי להסיר את מתאם הסיליקון, יש למשוך בחוזקה
כדי לחבר מתאים סיליקון, יש לחבר וללחוץ עד שישמע "קליק"

אפליקציית Nuance Hearing

הורידו את האפליקציה כדי ליהנות מאפשרויות נוספות

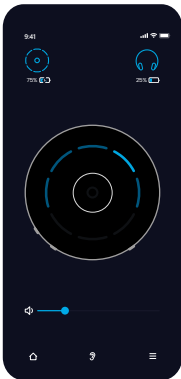

ניתן להשתמש בטלפון
כשלט רחוק למכשיר

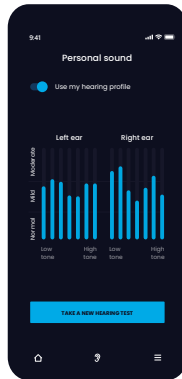

ניתן לבצע בדיקת
שמיעה כדי ליצור
פרופיל שמיעה אישי




סירקו את הקוד
להורדת האפליקציה

קישור האוזניות באמצעות בלוטות'

כדי לקשר את האוזניות למכשיר בלוטות' כלשהו או ל-Voice Selector Converse, יש לעקוב אחרי הצעדים הבאים:

1 הגדרת האוזניות במצב קישור

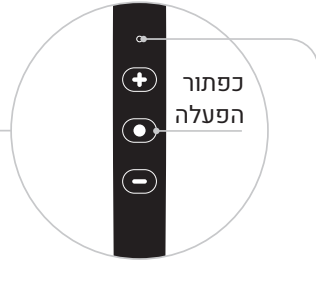

• לחצו על כפתור ההפעלה כדי לכבות את האוזניות. כעת תשמעו: "Power off"

• הרכיבו את האוזניות ולחצו לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה. כעת תשמעו: "Power on... Pairing"

- מקרא:
- כחול: הושלם הקישור
 - • כחול ואדום מהבהבים: חיפוש מכשיר חדש לקישור

2 קישור עם טלויזיה חכמה, סמארטפון או מחשב



- פתחו את הגדרות הבלוטות' של המכשיר שתרכזו לקשר לאוזניות
- בחרו בשם האוזניות: BEP240C
- כעת תשמעו: "Pairing successful, connected"

2 קישור מחדש עם Voice Selector Converse

רק אם הקישור אבד



כפתור הבלוטות'

• הסירו את כיסוי הסיליקון מהמוצר


• לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הבלוטות' עד שיתחיל מצב קישור



הקישור הושלם



מצב קישור

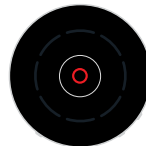

אין אוזניות מקושרות

מקרא:

הוראות בטיחות

אופן השימוש במוצר

Voice Selector Converse כולל אוזניות אלחוטיות, הוא מכשיר עזר ייחודי להפחתת רעשים סביבתיים ולמיקוד השמע בכיוון הרצוי. המכשיר מיועד להפעלה ולאחסון בטמפרטורות שבין 10° ל-45° צלזיוס ובלחות יחסית של 10% עד 95%.

אופן הניקוי

יש לנקות את המכשיר בעזרת מטלית לכה.

הוראות לסילוק ציוד אלקטרוני

יש לטפל בפסולת אלקטרונית לפי התקנות המקומיות. חברת Nuance Hearing Ltd. מעודדת את מחזור המכשיר או את הטיפול בו באמצעות סילוק מקומי של ציוד אלקטרוני. יש לפעול בהתאם לחוקים המקומיים.

על פי התקנות אנו נדרשים לספק את האזהרות הבאות:

- אזהרה: האזנה ממושכת בעוצמת שמע גבוהה אינה מומלצת ועלולה לגרום לנזק בלתי הפיך בשמיעתך
- אזהרה: שימוש באביזרים, רכיבים או חלקי חילוף שאינם מסופקים על ידי היצרן של Nuance Hearing עלולים לגרום לפגיעה באיכות הפעולה ובתנאי האחריות
- הסוללות ב-Voice Selector Converse ובאוזניות האלחוטיות אינן ניתנות להחלפה ואין לנסות להחליפן
- במידה והנך עושה שימוש במכשיר רפואי כלשהו או בשתל של מכשיר רפואי, כמו דפיברילטור או קוצב לב, ויש חשש שה-Voice Selector Converse שלך עלול להפריע לו, יש לפנות לרופא שלך או ליצרן המכשיר ולקבל מידע על הסיכון האפשרי

תקינה

המוצר עומד בתקנים בינלאומיים מחמירים של בטיחות חשמל ותאימות אלקטרומגנטית.

אנחנו כאן בשבילך

לתמיכה באתר יש לסרוק את הקוד
support@nuancehear.com
www.nuancehear.com



כל הזכויות שמורות לניואנס שמע בע"מ 2022. ניואנס שמע הוא סימן מסחרי של ניואנס שמע בע"מ.
אין לשכפל את תוכן מסמך זה ללא אישור בכתב של חברת ניואנס שמע.