


מדריך למשתמש



איך מתחילים?

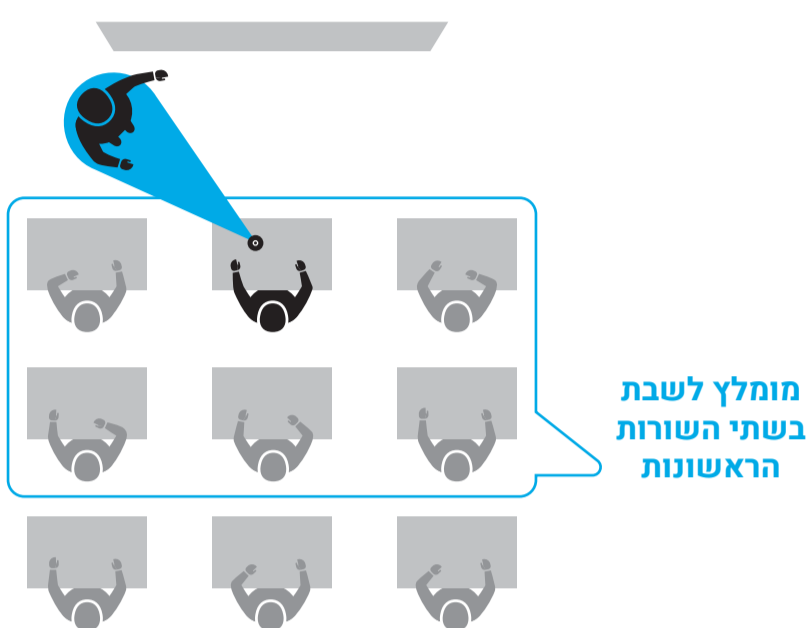

ניתן לעבור בין שלושת המצבים המפורטים בעמודים הבאים:

הרצאה


מעקב אוטומטי אחר תנועת המורה בחזית הכיתה



לחיצה במרכז כדי לעבור בין הרצאה לדיון

דיון


מעקב אוטומטי אחר הדובר/ת הנוכחי/ת בכל הכיוונים

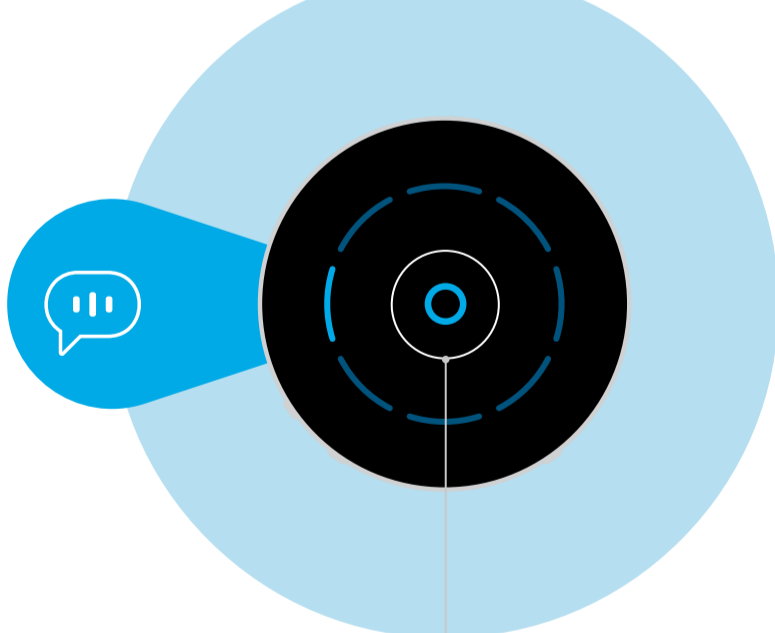

לחיצה במרכז כדי לעבור בין דיון להרצאה


שיחה

בחירה ידנית של הכיוון של שותפך לשיחה

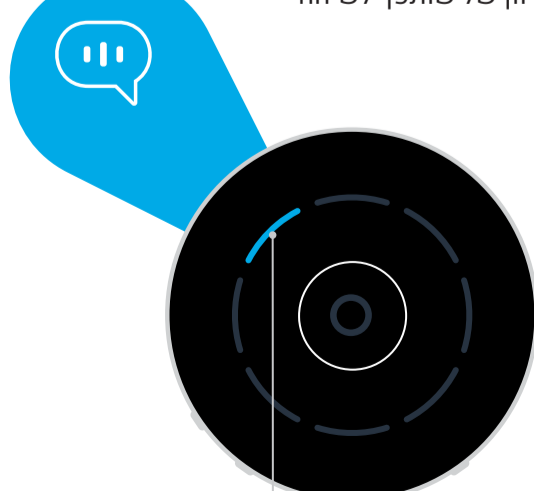

לחיצה על מקטע כדי לשמוע דובר מסוים

סוללה וטעינה

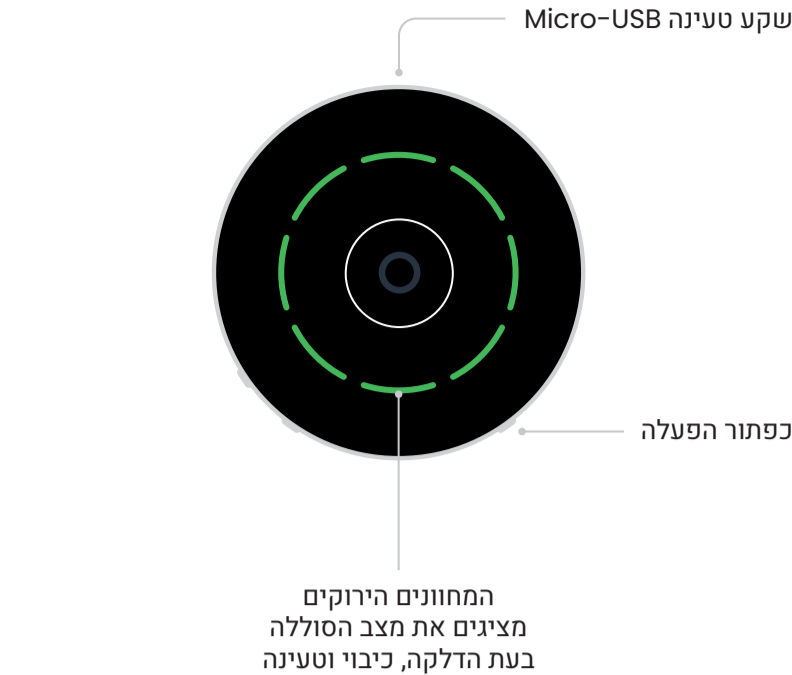

עוצמת שמע


כדי ליהנות מחוויה מיטבית, יש לכוון את עוצמת השמע כך שהצלילים יישמעו לך טבעיים (עוצמת שמע גבוהה מידי עשויה להגביר רעשי רקע וצלילים לא רצויים)



לתשומת לבך: האזנה בעוצמת שמע גבוהה למשך זמן ממושך, עלולה לגרום לפגיעה בשמיעתך וזאת מבלי לחוש אי נוחות כלשהי

אוזניות

ניתן להשתמש בכל אוזניות עם תקע אודיו 3.5 מ"מ

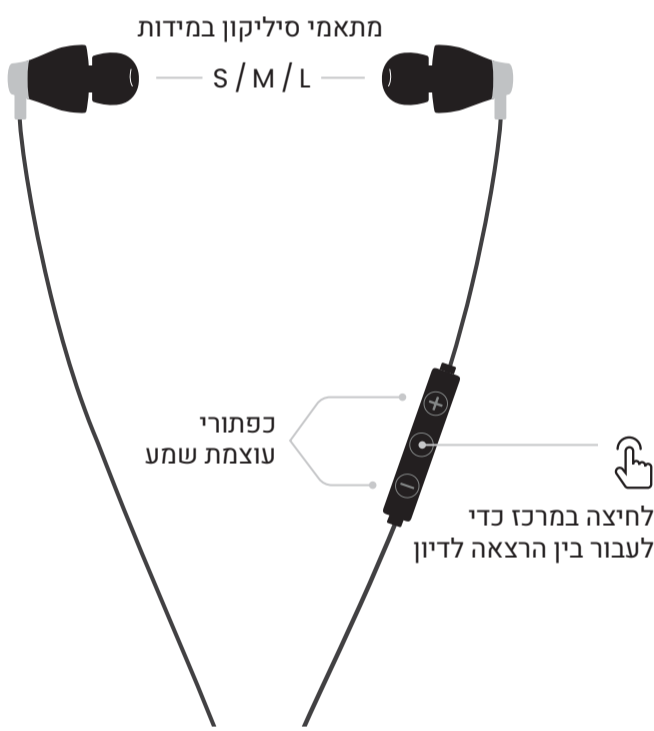

הוראות בטיחות

אופן השימוש במוצר
Voice Selector Study כולל אוזניות הוא מכשיר עזר ייחודי להפחתת רעשים סביבתיים ולמיקוד השמע בכיוון הרצוי. המכשיר מיועד להפעלה ולאחסון בטמפרטורות שבין 10° ל-45° צלזיוס ובלחות יחסית של 10% עד 95%.

אופן הניקוי
יש לנקות את המכשיר בעזרת מטלית לכה.

הוראות לסילוק ציוד אלקטרוני
יש לטפל בפסולת אלקטרונית לפי התקנות המקומיות. חברת Nuance Hearing Ltd מעודדת את מחזור המכשיר או את הטיפול בו באמצעות סילוק מקומי של ציוד אלקטרוני. יש לפעול בהתאם לחוקים המקומיים.

על פי התקנות אנו נדרשים לספק את האזהרות הבאות:

- אזהרה: האזנה ממושכת בעוצמת שמע גבוהה אינה מומלצת ועלולה לגרום לנזק בלתי הפיך בשמיעתך
- אזהרה: שימוש באביזרים, רכיבים או חלקי חילוף שאינם מסופקים על ידי היצרן של Nuance Hearing עלולים לגרום לפגיעה באיכות הפעולה ובביטול האחריות
- הסוללות ב-Voice Selector Study אינן ניתנות להחלפה ואין לנסות להחליפן
- במידה והנך עושה שימוש במכשיר רפואי כלשהו או בשתל של מכשיר רפואי, כמו דפיברילטור או קוצב לב, ויש חשש שה-Voice Selector Study שלך עלול להפריע לו, יש לפנות לרופא שלך או ליצרן המכשיר ולקבל מידע על הסיכון האפשרי

תקינה
המוצר עומד בתקנים בינלאומיים מחמירים של בטיחות חשמל ותאימות אלקטרומגנטית.



בהצלחה בלימודים!

לתמיכה באתר יש לסרוק את הקוד
support@nuancehear.com
www.nuancehear.com

